

NOTATKA DORADCZA
ADVISORY NOTE

Data wydania Date of issue	23-09-2020
Numer notatki Note number	ND_2009_01
Nazwa i numer katalogowy wyrobu Product name and catalogue number	ACCENT-200 MG Nr kat. / Cat. No 7-229, 7-262
Numer serii Lot number	n/d n/a
Data ważności Expiry date	all lots
Opis sytuacji Issue description	
<p>Dotyczy tylko Użytkowników analizatorów ACCENT-200 oraz ACCENT-200 II GEN.</p> <p>W przypadku wykonywania oznaczeń stężenia magnezu na analizatorach ACCENT-200 i ACCENT-200 II GEN może wystąpić, wpływający na wyniki oznaczeń, efekt przeniesienia. Aby temu zapobiec odczynnik należy stosować w połączeniu z programem mycia, używając płynu myjącego ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION (Nr kat. 3-109). Zastosowanie dodatkowego programu mycia z użyciem kwaśnego płynu myjącego zmniejsza, lecz nie niweluje całkowicie wpływu efektu przeniesienia na oznaczenia.</p> <p>For Users of ACCENT-200 and ACCENT-200 II GEN analyzers only.</p> <p>When performing determination of magnesium concentration in analyzers ACCENT-200 and ACCENT-200 II GEN, there is a probability of cross-contamination affecting the tests results. To avoid this effect the reagent should be used in combination with the washing program, using ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION (Cat. No 3-109). The use of an additional washing program with acidic washing solution reduces, but does not eliminate the influence of the carry-over effect on the assays.</p>	
Konieczne działania Necessary actions	
<p>W celu dalszej minimalizacji wpływu efektu przeniesienia na oznaczenia magnezu, rekomendujemy zastosowanie płynu ACCENT WASHING SOLUTION (Nr kat. 3-119) zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji: 51_03_24_001_ACCENT-200_CARRYOVER.</p> <p>Notatka ma charakter informacyjny. Nie należy niszczyć produktu!</p> <p>In order to further minimize the effect of cross-contamination, it is recommended the use the ACCENT WASHING SOLUTION (Cat. No 3-119) according to the guidelines contained in the instruction: 51_03_24_001_ACCENT-200_CARRYOVER.</p> <p>The note is only for reference. Do not dispose the product!</p>	

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Please provide this information to all Users of the above product and keep the Advisory Note as a quality system documentation.

Please complete and return the attached Verification Form to confirm receipt of the Advisory Note.

We apologize for any inconvenience caused by the above situation.

Z poważaniem,
Sincerely,

X *Anna Smolira*

Anna Smolira
Dział Zapewnienia Jakości/Quality Assurance
Podpisany przez: Anna Smolira