

**NOTATKA DORADCZA**

Data wydania	12.10.2020
Numer notatki	2010_01
Nazwa i numer katalogowy wyrobu	<b>Myt-5D</b> nr kat. <b>MYT502</b> oraz <b>MYT506</b> <b>Myt-CAL</b> nr kat. <b>MYTCAL2</b>
Numer serii	<b>MYT2010</b> (Myt-5D) <b>PLUS1020</b> (Myt-CAL)
Data ważności	<b>2020-12-05</b> (Myt-5D) <b>2020-11-05</b> (Myt-CAL)
Opis sytuacji	Na gwincie fiolki oraz we wnętrzu nakrętki mogą występować cząstki plastiku. Powodem występowania cząstek jest usterka maszyny dokręcającej naszego dostawcy. Zostały podjęte działania korygująco – zapobiegawcze, aby taka sytuacja nie powtórzyła się.
Konieczne działania	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Przed wymieszaniem krwi / kalibratora ostrożnie odkręcić fiolkę</li><li>2. Dokładnie wytrzeć gwint fiolki oraz wnętrze nakrętki bezpyłowym gazikiem</li><li>3. Dokładnie zakręcić fiolkę i używać zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji użycia.</li></ol> <p>Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza weryfikacyjnego. Notatka ma charakter informacyjny. <b>Nie należy niszczyć produktu!</b></p>

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Z poważaniem,

X

*Anna Smolira*

Anna Smolira  
Dział Zapewnienia Jakości/Quality Assurance  
Podpisany przez: Anna Smolira