



Genewa, 16 maja, 2018

Drodzy Klienci,

Informujemy, że w celu zapewnienia poprawności wyników, rekomendujemy stosowanie następującej procedury dotyczącej odczynnika HM22-003-10 Diluent for Mythic 22:

przed pierwszym otwarciem

- dokładnie i delikatnie mieszać odczynnik przez około 1 minutę, obracając pojemnik z pozycji pionowej do poziomej, aby zapewnić homogeniczność roztworu
- pozostawić odczynnik na 12 (przynajmniej) do 24 godzin (optymalnie), aby uniknąć obecności pęcherzyków powietrza w roztworze
- podłączyć odczynnik do analizatora

Powyższe zalecenie zostało wydane w celu uniknięcia problemów, które mogą pojawić się po transporcie (zmiany temperatury i pienienie odczynnika) lub po długim przechowywaniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, problemów lub komentarzy prosimy o kontakt.

Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

Robert Wiśniewski

WD 1805/01