

Lublin, 16.02.2016

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż w **Dziale Badań i Rozwoju** firmy **PZ CORMAY S.A.** została opracowana modyfikacja aplikacji do testu UA (nr kat. 7-308) i UA PLUS (nr kat. 7-363) na analizatory ACCENT-300. Wprowadzone zmiany dotyczą:

	UA (Nr kat. 7-308)		US PLUS (Nr kat. 7-363)	
	Dotychczasowa wersja	Obowiązująca wersja	Dotychczasowa wersja	Obowiązująca wersja
Liniowość [mg/dl]	22	32,4	dla surowicy: 30 dla moczu: 65	dla surowicy: 33 dla moczu: 68
Czułość [mg/dl]	0,75	1,15	dla surowicy: 0.78 dla moczu: 1.1	dla surowicy: 1.11 dla moczu: 1.27
Kalibracja	ONE/TWO POINT LINEAR	TWO POINT LINEAR	TWO POINT LINEAR	TWO POINT LINEAR
Czas odczytu	25	35	25	35

W załączeniu przesyłamy aktualne wersje aplikacji dla UA (Nr kat. 7-308) oraz UA PLUS (Nr kat. 7-363) na analizator ACCENT-300.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią i korektę powyższych parametrów w oprogramowaniu aparatu w zakładce „TESTY” > „PARAMETRY”.

Z poważaniem



Marzena Gałczyńska
Product Manager ds. Biochemii

W razie pytań jestem do dyspozycji:

tel.: 81 749 44 60

e-mail: mgalczynska@cormay.pl

tel. kom.: 661 551 196