

CORMAY HbA_{1c} DIRECT CONTROLS

KONTROLE DO OZNACZANIA STĘŻENIA HEMOGLOBINY A_{1c}



CORMAY HbA_{1c} DIRECT CONTROLS 4 x 0,5 ml Nr kat. 4-328

CORMAY HbA_{1c} DIRECT CONTROLS (CONTROL N i CONTROL P) są przeznaczone do rutynowej kontroli pomiarów stężenia hemoglobiny A_{1c}.

ODCZYNNIKI

Skład zestawu

CORMAY HbA_{1c} DIRECT CONTROLS

HbA_{1c} DIRECT CONTROL N 2 x 0,5 ml
HbA_{1c} DIRECT CONTROL P 2 x 0,5 ml

REKONSTYTUCJA

Po bardzo ostrożnym otwarciu fiolki (CONTROL N lub CONTROL P) dodać do niej dokładnie 0,5 ml wody dejonizowanej. Zakryć korkiem, delikatnie mieszać przez 10 minut do uzyskania jednorodnego roztworu. Rekonstruowane kontrole można porcjować i zamrażać w -20°C. Nie zamrażać powtórnie.

TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE

- Liofilizat przechowywany w temperaturze 2-8°C zachowuje trwałość do daty podanej na opakowaniu. Chronić przed światłem i przegrzaniem!
- Trwałość po rekonstytucji: 1 miesiąc w temp. 2-8°C
2 miesiące w temp. -20°C.

UWAGI

- Stosować tylko do badań diagnostycznych in vitro.
- Kontrole powinny być stosowane przez odpowiednio wyszkolony personel tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Kontrole zostały przygotowane na bazie krwi ludzkiej, w której testy na obecność HBsAg oraz przeciwciał anty-HCV i anty-HIV były ujemne. Niemniej jednak należy traktować je jako materiał potencjalnie zakaźny.
- Unikać kontaktu odczynnika ze skórą i błonami śluzowymi.
- Przed oznaczeniem HbA_{1c} DIRECT zrekonstruowane kontrole należy poddać procesowi lizowania odczynnikiem HEMOLYSING REAGENT zgodnie z instrukcją do zestawu do oznaczania HbA_{1c} DIRECT.

WYZNACZONE WARTOŚCI

Wartości wg NGSP [%]:

CONTROL	SERIA	WARTOŚĆ ŚRODKOWA [% HbA _{1c}]	ZAKRES [% HbA _{1c}]	ANALIZATOR
N	708-21	6,00	5,00 – 7,00	Prestige 24i Biolis 24i Premium Biolis 15i Biolis 50i ACCENT-200 ACCENT-200 II GEN ACCENT-220S
P		12,3	10,8 – 13,8	
N	708-21	5,30	4,30 – 6,30	ACCENT-300 BS-400, BS-480, BS-800, BS-800M Olympus AU400/AU640 HITACHI 911/912
P		12,3	10,8 – 13,8	

UTYLIZACJA ODPADÓW

Postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Data wydania: 08. 2017.

WYTWÓRCA

PZ CORMAY S.A.
ul. Wiosenna 22,
05-092 Łomianki, POLSKA
tel.: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>