


# PROCEDURA POBIERANIA I WGRYWANIA PLIKÓW QC

## POZIOM KOMPUTERA

1. Wchodzimy na stronę internetową producenta – Mindray:  
<https://www.mindray.com/pl>
2. Wybieramy w zakładkach: **Produkty i rozwiązania** > **Produkty** > **Diagnostyka laboratoryjna** > **Hematologia** > **Odczynniki hematologiczne**.

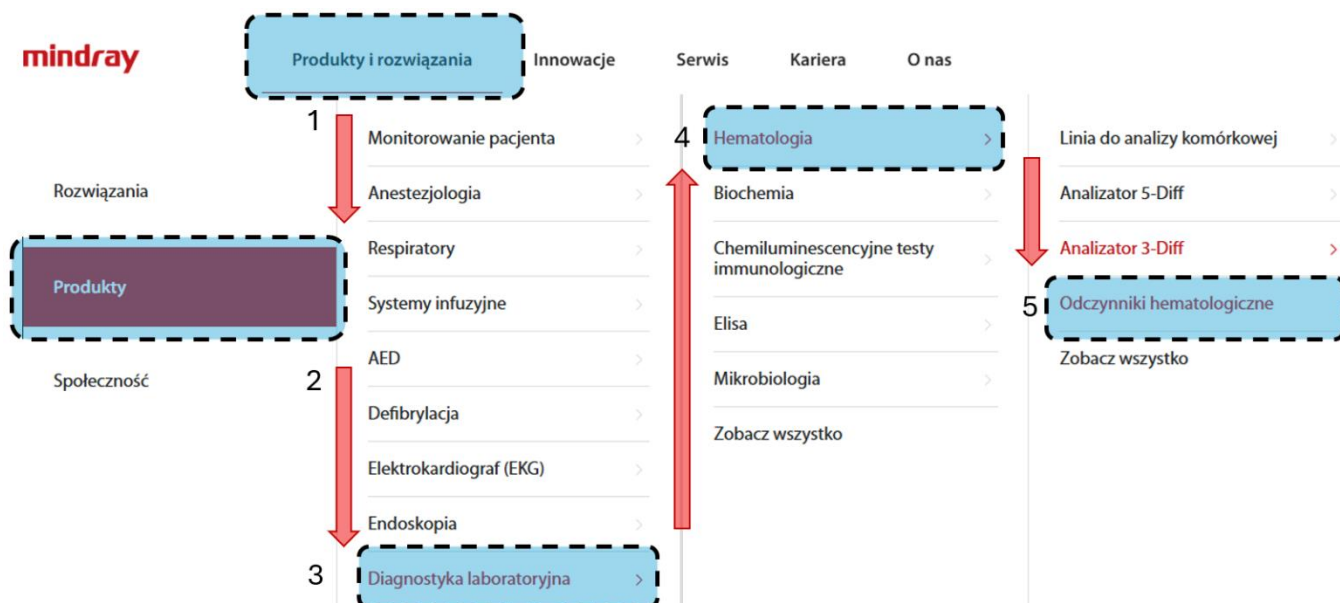

3. Schodzimy suwakiem w dół i wybieramy **Kontrola**.
4. Z listy rodzajów kontroli wybieramy **BC-6D\_Assay\_Value**.
5. Z opóźnieniem ok. 5 sekund pojawia się plik do pobrania **BC-6D\_Assay\_Value** ↓
6. Klikamy i pobieramy plik skompresowany.

**Dane do faktury:**

PZ Cormay S.A.  
ul. Wiosenna 22 | 05-092 Łomianki  
NIP: 1181872269 | REGON: 140777556

**Dane teleadresowe:**

PZ Cormay S.A.  
ul. Puławska 303 | 02-785 Warszawa  
office@cormay.com | tel.: (22) 751 79 10 | fax: (22) 751 79 11

[www.cormay.com](http://www.cormay.com)

## Kalibrator i kontrola

**Kalibrator**      **Kontrola**

C-reactive Protein (CRP) Calibratc ▾


**BC-6D Assay Value** ⌵

- B30\_Assay\_Value
- B55\_Assay\_Value
- BC-3D\_Assay\_Value
- BC-5D\_Assay\_Value
- BC-6D\_Assay\_Value**
- BC-BF\_Assay\_Value
- BC-RET\_Assay\_Value
- ASO\_CRP\_RF Triple Control\_Assay\_Value
- C-reactive Protein (CRP) Control\_Assay\_Value
- Hemoglobin A1C Control
- BR60 Assay Value
- Triple Control Assay Value

B30\_Assay\_Value ▾

7. Skompresowany plik **BC-6D\_Assay\_Value** znajdujemy w folderze **Pobrane** i rozpakowujemy (dla nowszych wersji Windows **wyodrębnić wszystkie**, dla starszych wersji konieczny program **7zip** lub **WinRAR**. Poproś dział informatyczny o pomoc).
8. Wybieramy odpowiedni LOT kontroli. Otwieramy folder. Otwieramy folder z MQI Files, który również należy rozpakować.

## POZIOM LABXPRT

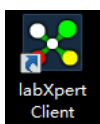

9. Włącz oprogramowanie LabXpert
10. Wybierz w pionowych zakładkach z lewej strony **QC** – poniżej **Konf.**  
Następnie wybierz wolną pozycję kontroli i u góry kliknij **Wczytaj plik**


**Dane do faktury:**

PZ Cormay S.A.  
ul. Wiosenna 22 | 05-092 Łomianki  
NIP: 1181872269 | REGON: 140777556


**Dane teleadresowe:**

PZ Cormay S.A.  
ul. Puławska 303 | 02-785 Warszawa  
office@cormay.com | tel.: (22) 751 79 10 | fax: (22) 751 79 11


[www.cormay.com](http://www.cormay.com)

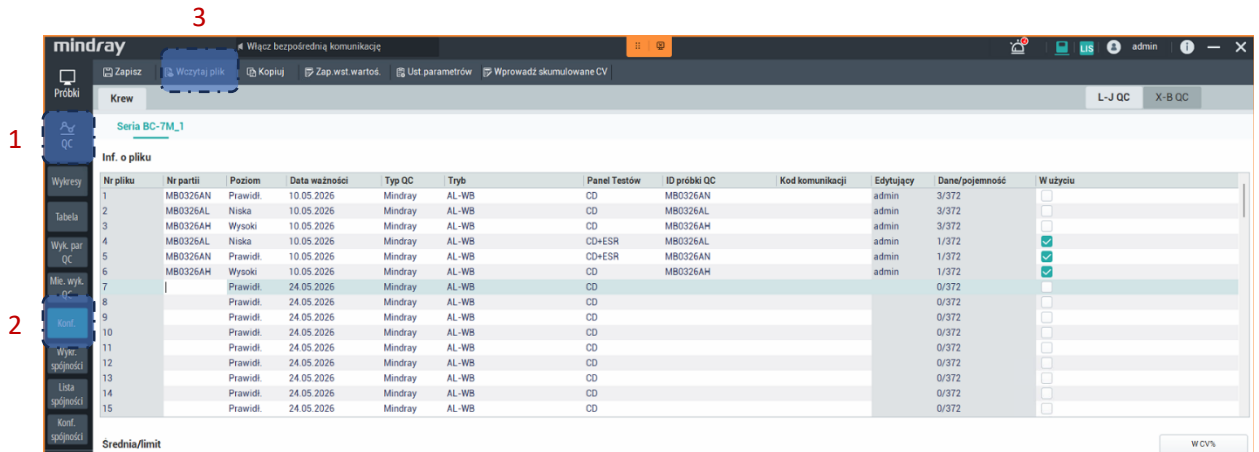

11. Otworzy się okienko dialogowe **Wczytaj plik**. Wybieramy **Przejrzyj**

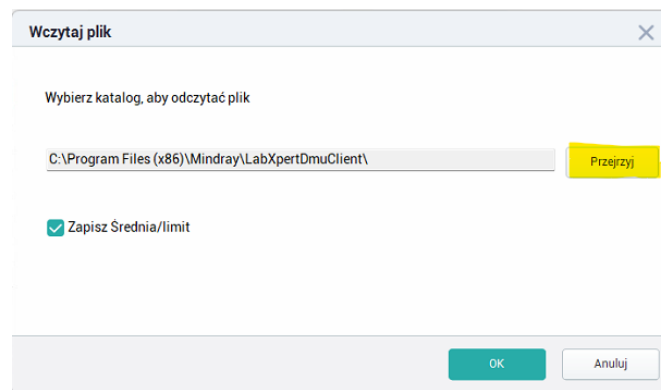

12. W Pobrane (po lewej stronie) odszukujemy rozpakowany przez nas folder **BC-6D\_Assay\_Value**, odszukujemy właściwy LOT kontroli, pliki MQI i wybieramy właściwy plik kontrolny. Dla każdego poziomu oddzielnie.

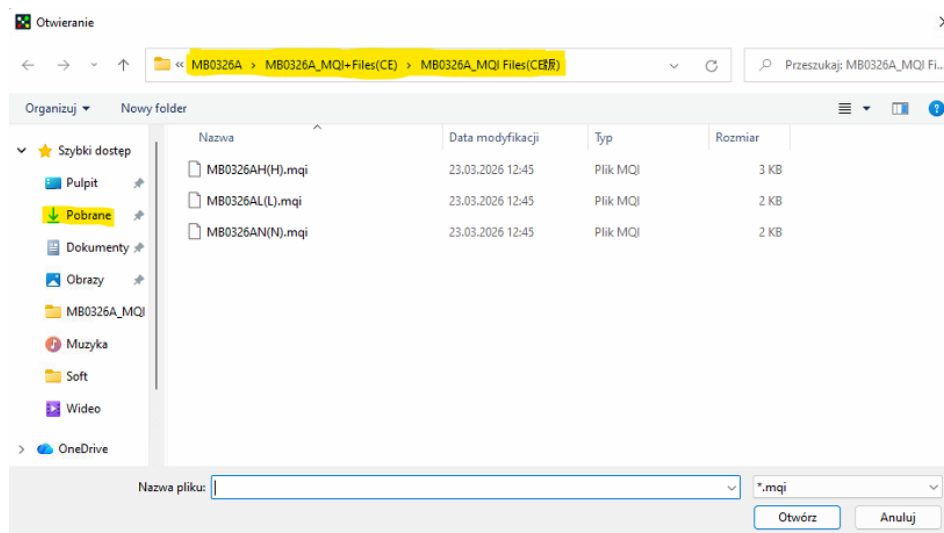

**Dane do faktury:**  
PZ Cormay S.A.  
ul. Wiosenna 22 | 05-092 Łomianki  
NIP: 1181872269 | REGON: 140777556

**Dane teleadresowe:**  
PZ Cormay S.A.  
ul. Puławska 303 | 02-785 Warszawa  
office@cormay.com | tel.: (22) 751 79 10 | fax: (22) 751 79 11

[www.cormay.com](http://www.cormay.com)

13. W przypadku oznaczania parametru OB dla poziomu kontroli **Niski** oraz **Prawidłowy** należy zmienić panel testu na **CD+ESR**.
14. Po przygotowaniu plików kontrolnych w oprogramowaniu LabXpert pliki zapisują się również w aparacie. Fiolki z krwią kontrolną po ogrzaniu 15 minut w temperaturze pokojowej oraz wymieszaniu można oznaczać w raku w trybie automatycznym.



---

**Dane do faktury:**

PZ Cormay S.A.  
ul. Wiosenna 22 | 05-092 Łomianki  
NIP: 1181872269 | REGON: 140777556

**Dane teleadresowe:**

PZ Cormay S.A.  
ul. Puławska 303 | 02-785 Warszawa  
office@cormay.com | tel.: (22) 751 79 10 | fax: (22) 751 79 11

[www.cormay.com](http://www.cormay.com)