

## NOTATKA DORADCZA

Data wydania	29.03.2023	
Numer notatki	ND_2303_04	
Nazwa i numer katalogowy wyrobu	<b>Nazwa</b>	<b>Nr kat.</b>
	Liquick Cor-FERRUM 30	3-257
	Liquick Cor-FERRUM 60	3-258
	Liquick Cor-FERRUM 120	3-334
Numer serii	wszystkie serie	
Data ważności	n/d	
Opis sytuacji		
<p>Podczas rutynowej kontroli jakości odczynnika uzyskano wyniki wykraczające poza wewnętrzne kryteria akceptacji. Dla metodyki manualnej ponownie wyznaczono wartości żelaza w surowicach kontrolnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CORMAY SERUM HN</b> (Nr kat. 5-172) serii HN10,</li> <li>- <b>CORMAY SERUM HP</b> (Nr kat. 5-173) serii HP10.</li> </ul> <p>Nowe wartości zamieszczono w erracie NDE_2303_03 (Załącznik 1).</p>		
Konieczne działania		
<p>Należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapoznać się z treścią erraty NDE_2303_03 (Załącznik 1) i od momentu otrzymania notatki doradczej <b>stosować nowo wyznaczone wartości</b> kontroli podczas oznaczeń żelaza,</li> <li>• przeprowadzić <b>kontrolę jakości</b> przed zlecaniem próbek pacjentów,</li> <li>• odesłać wypełniony formularz weryfikacyjny.</li> </ul> <p>Notatka ma charakter informacyjny. <b>Nie należy niszczyć produktu!</b></p>		

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 665 371 525

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Z poważaniem,