

Lublin, 21.03.2023

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że firma PZ Cormay S.A. z powodu globalnych zaburzeń łańcucha dostaw, została dotknięta brakiem surowca do produkcji: **5-105, CORMAY ETHANOL CALIBRATORS** oraz **5-106, CORMAY ETHANOL CALIBRATOR 100**, w związku z powyższym dostępność wymienionych zestawów zostaje wstrzymana do odwołania. Aby umożliwić dalsze wykonywanie oznaczeń stężenia alkoholu etylowego i wykonywanie kalibracji, zostały uruchomione alternatywne źródła dostaw.

Do kalibracji zalecamy używanie zamiennika z firmy ACQ Science GmbH:

- ✓ nr kat.: AQ10-015, nazwa: EtOH Cal AQ 1,0 g/L, skład: 10 x 1,5 ml
- ✓ nr kat.: AQ30-015, nazwa: EtOH Cal AQ 3,0 g/L, skład: 10 x 1,5 ml

Reguły kalibracji na analizatorach automatycznych i oznaczeń manualnych nie ulegają zmianie:

- ✓ Do kalibracji na analizatorach automatycznych zalecane jest stosowanie dwóch poziomów kalibratora (1,0 g/L i 3,0 g/L) oraz wody dejonizowanej lub 0,9% roztworu NaCl jako kalibratora 0; więcej szczegółów można znaleźć w dedykowanych instrukcjach użycia.
- ✓ W przypadku kalibracji oznaczeń manualnych zalecane jest stosowanie jednego, niższego poziomu kalibratora (1,0 g/L).

Dodatkowe informacje:

- ✓ Oba poziomy kalibratora należy zamawiać osobno.
- ✓ Data ważności dostępnych w sprzedaży zestawów to: maj 2029.
- ✓ Firma ACQ Science GmbH podaje wartości dla etanolu w jednostkach 'g/L'. Jeżeli używają Państwo jednostek w 'mg/dl', należy ujednolicić obie jednostki i wprowadzić prawidłowe wartości do analizatorów:
1,0 g/L → 100 mg/dL
3,0 g/L → 300 mg/dL
- ✓ Trwałość i przechowywanie kalibratora EtOH:
 - a) Nieotwierane kalibratory przechowywane w temperaturze 2-8°C zachowują trwałość do daty podanej na opakowaniu.
 - b) Trwałość po otwarciu:
Zaleca się zawartość ampułki/ fiolki zużyć natychmiast po otwarciu z powodu występujących zmian stężenia spowodowanych parowaniem alkoholu. Otwarta ampułka/ fiolka może być użyta tylko jednokrotnie! Nie należy zamrażać kalibratorów!

Dane do faktury:

PZ Cormay S.A.
ul. Wiosenna 22 | 05-092 Łomianki
NIP: 1181872269 | REGON: 140777556

Dane teleadresowe:

PZ Cormay S.A.
ul. Puławska 303 | 02-785 Warszawa
office@cormay.com | tel.: (22) 751 79 10 | fax: (22) 751 79 11

www.cormay.com

Za wszelkie niedogodności z góry przepraszamy.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszymi Przedstawicielami Regionalnymi.

Załączniki:

1. Instrukcja użycia EtOH Cal AQ 1,0 g/L
2. Instrukcja użycia EtOH Cal AQ 3,0 g/L
3. Karta Charakterystyki (Safety Data Sheet)

Z poważaniem,

Product Manager ds. Chemii klinicznej

NIO_2303_01

Dane do faktury:

PZ Cormay S.A.
ul. Wiosenna 22 | 05-092 Łomianki
NIP: 1181872269 | REGON: 140777556

Dane teleadresowe:

PZ Cormay S.A.
ul. Puławska 303 | 02-785 Warszawa
office@cormay.com | tel.: (22) 751 79 10 | fax: (22) 751 79 11

www.cormay.com